

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12

Samtliga modeller till serienummer 96241

För Stolvågar med högre serienummer gäller INSTRUKTION-VEH-200-EC

Sid 2

VEH-250-10 med serienummer från Sn 96001 - 96060. Dessa vågar har fast monterat ryggstöd och 9V batteri under sitsen

Sid 3 och 4

VEH-250-11 med serienummer 96061 - 96120. Dessa vågar har fast monterat ryggstöd och uppladdningsbara batterier. Observera (På vågar med serienummer 96081-96120 är 2 och 3 skiftade.)

Sid 5 och 6

VEH-250-11 med serienummer 96121 - 96181. Dessa vågar har monterbart ryggstöd och uppladdningsbara batterier.

Sid 7 till 9

Stolvåg VEH-250-12 med serienummer Sn 96182 - 96241. Dessa vågar har monterbart ryggstöd och 9V batteri i Indikatorn.



Allmänt

Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.

Vägning

1. Tryck på On. Om vågen är på men inte visar noll, tryck på On.
2. De bakre hjulen bör låsas innan vägning.
3. Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
4. Alternativt kan vågen nollställas med On. När vågen avlastas kan vikten läsas av (med ett minustecken före). I detta läge står vikten kvar i 2 minuter, sedan stängsvågen om den inte används.
5. Vågen kan stängas av med Off-knappen.

Batteri

Batteriet räcker till ca 600 st vägningar a' 2 minuter. Batteriet sitter under stolsitsen i en svart hållare. Använd 9 Volts alkaliskt batteri.

Skötsel

Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stolsdynan, där vågmekaniken sitter.

Felsökning / service**OBS Om Vågindikatorn ska öppnas.**

Lossa skruvarna på indikatorns undersida. Öppna lådan försiktigt.

Inkoppling

DIN-Kontakt	1	2	3	4	5	6
Anslutning kort	+E	+S	-S	-E	+B	-B
Färger	Grön	Röd	Vit	Svart	Blå	Brun

Felsökning

Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad.

Stäng av och sätt på vågen igen eller tryck på On-knappen. Vågen ska visa 0,0.

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning.

Kalibrering:

Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att kalibrera enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säkra på att den kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den är märkt med.



1. Stäng av och sätt på vågen igen eller tryck på On-knappen. Vågen ska visa 0,0.
2. Stolvågen belastas med en kalibreringsvikt på 70 - 80 Kg. Med potentiometern VR2 (till höger om VR1) justeras indikatorn så att den visar aktuell vikt.
3. Upprepa punkt 1 och 2 tills indikatorn visar rätt.

Fel: Vågen är "död".

1. Kontrollera att matningsspänningen från batteriet finns på kortet. Mellan +B och -B ska vara 9 VDC.
2. Kontrollera att spänningen mellan plint +E och -E är ca 5,5 VDC
3. Kontrollera sladdkontakten och att trådarna till kortet sitter fast ordentligt.

Fel: Vågen är ostabil.

1. Stäng av och sätt på stolvågen igen eller tryck på On-knappen. Vågen ska visa 0,0.
2. Kontrollera att kablarna till lastcell och batteri ej har skadats.
3. Kontrollera att spänningen mellan plint +E och -E är ca 5,5 VDC.
4. Kontrollera att signalen från vågen +S och -S är mellan 0 och 10 mV beroende på last.

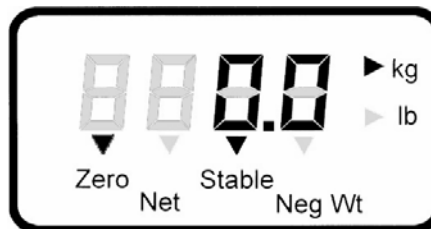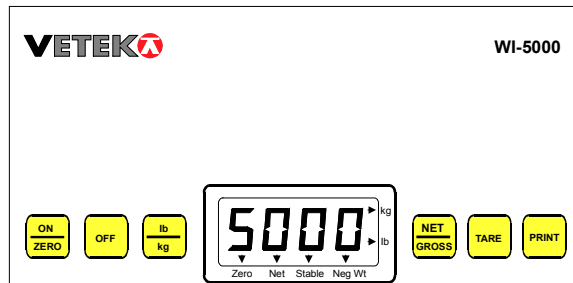serienummer före 96121 (med fast monterat ryggstöd)**Allmänt**

Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.

Vägning

1. Tryck på **ON**. Efter ca 10 sek är vågen klar för vägning. Displayen ska se ut enl ovan bild. Om vågen är på men inte visar noll, tryck på **TARE**
2. De bakre hjulen ska låsas innan vägning.
3. Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
4. Alternativt, om personen redan sitter i stolen, kan vågen nollställas med **TARE**. När vågen avlastas kan vikten läsas av (med ett minustecken före). I detta läge står vikten kvar i 4 minuter, sedan stängs vågen om den inte används.
5. Vågen kan stängas av med **OFF**.

Laddning av batteriet

- Ladda batteriet om "batt" blinkar i displayen. Ladda i ca 10-14 timmar.
- För att maximera batteriets livslängd rekommenderar vi att batteriet laddas ur helt var 5:e gång batteriet laddas.
- Batteriet är helt urladdat när "batt" blinkar. Uppladdat batteri ska räcka till några hundra vägningar. **OBS** Använd bara laddare Batteriladdare MW9698UGS(EU) 11,2V 120mA eller likvärdig. Minus centerstift.

Skötsel

Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stolsdynan, där vågmekaniken sitter.

IGÅNGKÖRNING**Allmänt**

- Kontrollera att vågen inte skadats mekaniskt vid ankomst.
- När vågen levereras är Vågindikator/Handtag-delen inte monterad. Den monteras enkelt bakom ryggstödet och skruvas fast. Sätt i kontakten på indikatorns undersida. Drag inte i kabeln, håll i kontakten. Det finns en liten knapp som mekaniskt lås i plug-in kontakten.
- Vågen är klar att använda.

Kalibrering

Vi rekommenderar att vågen kalibreras i intervall om 1 år. Om det inte finns tillgång till en tillförlitlig kalibreringsvikt rekommenderar vi att Ni sänder in vågen till oss för kalibrering. Det är emellertid möjligt att kalibrera vågen själv med en mycket noggrann kalibreringsvikt (krönt klass) på 70-100 kg. Vågen är vid leverans kalibrerad med M1 klassade vikter. En ungefärlig kalibrering kan göras enligt nedan förenklade instruktion.

Fullständig information på Vågindikatorn WI-5000 kan laddas hem på www.vetek.net

Felsökning / service

OBS Om Vågindikatorn ska öppnas.

Lossa skruvarna på indikatorns sida. Öppna lådan försiktigt.

Inkoppling av lastcell (tyvärr är dokumentationen tvetydig så skulle inte denna instruktion fungera, prova den generella inkopplingsinstruktion som finns nederst på denna sida)

	Serienummer	Lastcell	Lastcell	Lastcell	Lastcell
DIN-Kontakt		1	2	3	4
Anslutning fr lastcellen		+Matning	-Matning	+Signal	-Signal
Lastcell Tedeo 1241	96061-96080	Röd	Svart	Grön	Vit
Lastcell Transcell FAS	96081-96120	Röd	Grön	Svart	Vit

Batteriladdaren inkopplas med – på stiftet.

Felsökning

Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad.

1. Stäng av och sätt på vågen igen eller tryck på ON. Vågen ska visa 0,0.
2. Kvarstår felet, kontrollera batteriladdningen.
3. Kvarstår felet kontrollera att inte något fotstöd ligger emot stolens hjul.
4. Inspektera kabeln till lastcellen under sitsen.

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning.

Kalibrering:

Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att kalibrera enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säkra på att den kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den är märkt med.

Fel: Vågen visar 0,0 hela tiden, är "död" eller ostabil.

1. Kontrollera batteriladdningen.
2. Kontrollera sladdkontakten.

Fel: Vågen visar F1

Kalibreringsomkopplaren på Indikatorns baksida har av misstag ställts i kalibreringsläge. Ställ om den till andra läget.

Förenklad kalibrering

Tryckknappsfunktioner för kalibrering

Stega upp och ner i parametrarna med **PRINT** (upp) eller **TARE** (ner).

Först ska vågens nollpunkt kalibreras.

1. Avlasta vågen. Tryck på **OFF**.
2. Slå om den lilla omkopplaren på indikatorns baksidan till kalibreringsläge.
3. Tryck på **ON**. "F1" syns på displayen.
4. Stega till "F16" med **PRINT/TARE**.
5. Tryck **ZERO**. Displayen kommer momentant att visa "C0" följt av ett värde. (Detta värde är A/D-omvandlarens interna värde).
6. Tryck **ZERO** för nollställning. Tryck sedan **NET/GROSS** för att spara värdet.
7. Displayen visar momentant "EndC0" och går sedan tillbaka till **F16**. Gå nu till **F17** för maxkalibreringen.

Sedan ska vågens maxpunkt kalibreras.

1. Placera en känd vikt, minst 20 kg (helst 50-60 kg eller mer) på vågen.
2. När Du är i "F17". Tryck på **ZERO**. Displayen kommer momentant att visa "C1" för maxkalibreringen, följt av ett värde med blinkande siffror.
3. Tryck in värdet på vikten, tex. 25,0 kg på samma sätt som ovan. Läget på den blinkande siffran ändras med **PRINT** eller **TARE**. Öka det blinkande värdet med **lb/kg** och minska det med **ZERO**. Efter att rätt värde är inställt lagras detta med **NET/GROSS**.
4. Om kalibreringen har lyckats kommer "EndC1" att blinka momentant och sedan gå till **F17**. Om inte kalibreringen har lyckats kommer ett felmeddelande att visas. Prova att göra om kalibreringen.
4. Slå om kalibreringsomkopplaren till Normalläge och kontrollera att vågen visar rätt.

Om inte kalibreringen lyckas, lossa Indikatorn WI-5000 med de 4 skruvarna på baksidan och skicka den till nedan adress tillsammans med ett meddelande om vad som inte gick bra.



Generell instruktion för anslutning av lastcell med DIN kontakt till Vågindikator för Stolvåg

1. Lossa hylsan på DIN-kontakten från lastcellen och låt stiften sitta i honkontakten på Indikatorn.
2. Starta Indikatorn.
3. Mät med ett universalinstrument fram vilka stift som har ca 5 Volt. Notera det som har plus-potential som +Matning och det med noll potential som –Matning.
4. Kontrollera i nedan tabell vilken lastcell som sitter under sitsen och löd fast +Matning och –Matning.
5. Löd fast –Signal till stift 4 i kontakten och +Signal till det stift som ingen tråd är lödd på.
6. Kalibrera vågen. Om Indikator av något skäl inte går att kalibrera, skifta + och -Signal och prova igen.

Anslutning fr lastcellen	+Matning	-Matning	+Signal	-Signal
Lastcell Tedeo 1241 / 1242	Grön	Svart	Röd	Vit
Lastcell Transcell FAS	Röd	Svart	Grön	Vit
Lastcell Tempo AKA	Röd	Svart	Vit	Grön

HANDHAVANDEBESKRIVNING

Stolvåg VEH-250-11_med serienummer 96121 - 96181

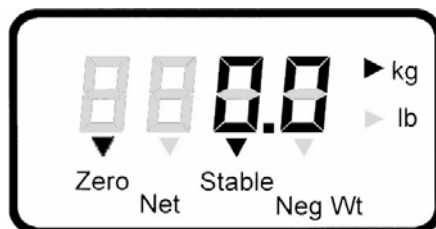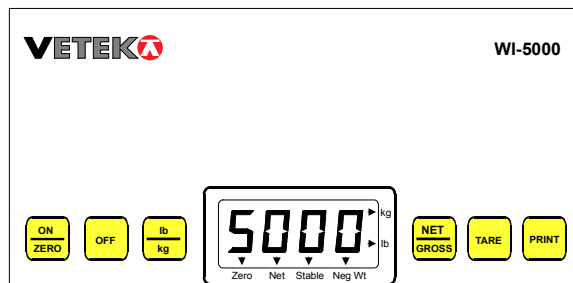

Allmänt

Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.

Vägning

1. Tryck på **ON**. Efter ca 10 sek är vågen klar för vägning. Displayen ska se ut enl. ovan bild. Om vågen är på men inte visar noll, tryck på **TARE**
2. De bakre hjulen ska låsas innan vägning.
3. Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
4. Alternativt, om personen redan sitter i stolen, kan vågen nollställas med **TARE**. När vågen avlastas kan vikten läsas av (med ett minustecken före). I detta läge står vikten kvar i 4 minuter, sedan stängs vågen om den inte används.
5. Vågen kan stängas av med **OFF**.

Laddning av batteriet

- Ladda batteriet om "batt" blinkar i displayen. Ladda i ca 10-14 timmar.
- För att maximera batteriets livslängd rekommenderar vi att batteriet laddas ur helt var 5:e gång batteriet laddas.
- Batteriet är helt urladdat när "batt" blinkar. Uppladdat batteri ska räcka till några hundra vägningar. **OBS** Använd bara laddare Batteriladdare MW9698UGS(EU) 11,2V 120mA eller likvärdig. Minus centerstift.

Skötsel

Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stoldynan, där vågmekanismen sitter.

IGÅNGKÖRNING

Allmänt

- Kontrollera att vågen inte skadats mekaniskt vid ankomst.
- När vågen levereras är ryggstöd, vågindikatorordel, armstöd inte monterade. De monteras enligt nedan bilder. Glöm inte att dra åt skruvarna ordentligt. Sätt i kontakten på indikatorns undersida. Drag inte i kabeln, håll i kontakten. Det finns en liten knapp som mekaniskt lås i plug-in kontakten.
- Vågen är klar att använda.



Fullständig information på Vågindikatorn WI-5000 kan laddas hem på www.vetek.net

Felsökning / service

OBS Om Vågindikatorn ska öppnas.

Lossa skruvarna på indikatorns sida. Öppna lådan försiktigt.

Inkoppling av lastcell (tyvärr är dokumentationen tvetydig så skulle inte denna instruktion fungera, pröva den generella inkopplingsinstruktion som finns nederst på denna sida)

	Serienummer	Lastcell	Lastcell	Lastcell	Lastcell
DIN-Kontakt		1	2	3	4
Anslutning fr lastcellen		+Matning	-Matning	+Signal	-Signal
Lastcell Transcell FAS	96121-96141	Röd	Svart	Grön	Vit
Lastcell Tempo AKA	96142-96181	Röd	Svart	Vit	Grön

Batteriladdaren inkopplas med – på stiftet.

Felsökning

Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad.

1. Stäng av och sätt på vågen igen eller tryck på ON. Vågen ska visa 0,0.
2. Kvarstår felet, kontrollera batteriladdningen.
3. Kvarstår felet kontrollera att inte något fotstöd ligger emot stolens hjul.
4. Inspektera kabeln till lastcellen under sitsen.

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning.

Kalibrering:

Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att kalibrera enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säkra på att den kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den är märkt med.

Fel: Vågen visar 0,0 hela tiden, är "död" eller ostabil.

1. Kontrollera batteriladdningen.
2. Kontrollera sladdkontakten.

Fel: Vågen visar F1

Kalibreringsomkopplaren på Indikatorns baksida har av misstag ställts i kalibreringsläge. Ställ om den till andra läget.

Förenklad kalibrering

Vi rekommenderar att vågen kalibreras i intervall om 1 år. Om det inte finns tillgång till en tillförlitlig kalibreringsvikt rekommenderar vi att Ni sänder in vågen till oss för kalibrering. Det är emellertid möjligt att kalibrera vågen själv med en mycket noggrann kalibreringsvikt (krönt klass) på 70-100 kg. Vågen är vid leverans kalibrerad med M1 klassade vikter. En ungefärlig kalibrering kan göras enligt nedan förenklade instruktion.

Tryckknappsfunktioner för kalibrering

Stega upp och ner i parametrarna med **PRINT** (upp) eller **TARE** (ner).

Först ska vågens nollpunkt kalibreras.

1. Avlasta vågen. Tryck på **OFF**.
2. Slå om den lilla omkopplaren på indikatorns baksidan till kalibreringsläge.
3. Tryck på **ON**. "F1" syns på displayen.
4. Stega till "F16" med **PRINT/TARE**.
5. Tryck **ZERO**. Displayen kommer momentant att visa "C0" följt av ett värde. (Detta värde är A/D-omvandlarens interna värde).
6. Tryck **ZERO** för nollställning. Tryck sedan **NET/GROSS** för att spara värdet.
7. Displayen visar momentant "EndC0" och går sedan tillbaks till **F16**. Gå nu till **F17** för maxkalibreringen.

Sedan ska vågens maxpunkt kalibreras.

1. Placera en känd vikt, minst 20 kg (helst 50-60 kg eller mer) på vågen.
2. När Du är i "F17". Tryck på **ZERO**. Displayen kommer momentant att visa "C1" för maxkalibreringen, följt av ett värde med blinkande siffror.
3. Tryck in värdet på vikten, tex. 25,0 kg på samma sätt som ovan. Läget på den blinkande siffran ändras med **PRINT** eller **TARE**. Öka det blinkande värdet med **lb/kg** och minska det med **ZERO**. Efter att rätt värde är inställt lagras detta med **NET/GROSS**.
4. Om kalibreringen har lyckats kommer "EndC1" att blinka momentant och sedan gå till **F17**. Om inte kalibreringen har lyckats kommer ett felmeddelande att visas. Prova att göra om kalibreringen.
5. Slå om kalibreringsomkopplaren till Normalläge och kontrollera att vågen visar rätt.

Om inte kalibreringen lyckas, lossa Indikatorn WI-5000 med de 4 skruvarna på baksidan och skicka den till nedan adress tillsammans med ett meddelande om vad som inte gick bra.


Generell instruktion för anslutning av lastcell med DIN kontakt till Vågindikator för Stolvåg

1. Lossa hylsan på DIN-kontakten från lastcellen och låt stiften sitta i honkontakten på Indikatorn.
2. Starta Indikatorn.
3. Mät med ett universalinstrument fram vilka stift som har ca 5 Volt. Notera det som har plus-potential som +Matning och det med noll potential som –Matning.
4. Kontrollera i nedan tabell vilken lastcell som sitter under sitsen och löd fast +Matning och –Matning.
5. Löd fast –Signal till stift 4 i kontakten och +Signal till det stift som ingen tråd är lödd på.
6. Kalibrera vågen. Om Indikator av något skäl inte går att kalibrera, skifta + och -Signal och pröva igen.

Anslutning fr lastcellen	+Matning	-Matning	+Signal	-Signal
Lastcell Tedeo 1241 / 1242	Grön	Svart	Röd	Vit
Lastcell Transcell FAS	Röd	Svart	Grön	Vit
Lastcell Tempo AKA	Röd	Svart	Vit	Grön

HANDHAVANDEBESKRIVNING OCH KALIBRERING

Stolvåg VEH-250-12 med serienummer Sn 96182 - 96241

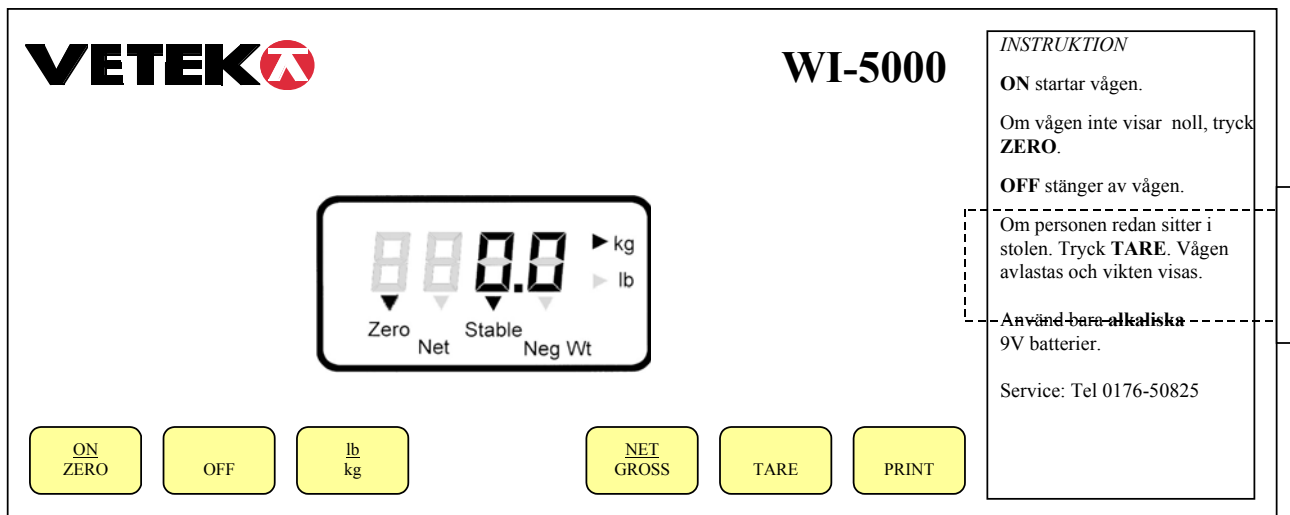

Tryckknappsfunktioner

Displayindikatorer

PRINT	Sänder "Print" data till dator/skrivare om vågsignalen är stabil och inom mätområdet. Är bortkopplad om "kontinuerlig information" är vald i användarmenyn.
Lb/kg	Växlar mellan lb och kg. Är normalt bortkopplad.
NET/GROSS	Växlar mellan Brutto och Netto om Tarafunktionen är aktiverad.
TARE	Tarerar indikatorn i Brutto eller nettomode. Fungerar inte om vågvärdet är negativt.
OFF	Stänger av vågen
ON/ZERO	Nollställer indikatorn i bruttoläge om värdet är inom "nollområdet".

LCD Indikator	Betydelse
Zero	Nollindikator visar att visat värde är inom ± 0.25 skaldelar.
Net	Visar att displayvärdet är netto.
Stable	Visar att viktsvärdet är stabilt.
Neg Wt	Visar att viktsvärdet är negativt.
lb, kg	Visar viktsenhet..

Allmänt

Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.

Vägning

- Tryck på **ON**. Efter ca 10 sek är vågen klar för vägning. Displayen ska se ut enl. ovan bild. Om vågen är på men inte visar noll, tryck på **TARE**
- De bakre hjulen ska låsas innan vägning.
- Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
- Alternativt, om personen redan sitter i stolen, kan vågen nollställas med **TARE**. När vågen avlastas kan vikten läsas av (med ett minustecken före). I detta läge står vikten kvar i 4 minuter, sedan stängs vågen om den inte används.
- Vågen kan stängas av med **OFF**.

Batteriet

Sitter i Indikatorns högra ände. Om "batt" blinkar i displayen eller vågen inte startar. Byt till ett vanligt **alkaliskt** 9V batteri.

Skötsel

Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stoldynan, där vågmekaniken (lastcellen) sitter.

Anm: Under normalt användande ska inte armstöden vikas upp mer än till de ligger emot ryggstödet. Om det måste vikas tillbaks 270 grader måste det ske försiktigt så att inte ryggstödet skadas.

IGÅNGKÖRNING

Allmänt

1. Kontrollera att vågen inte skadats mekaniskt vid ankomst.
2. När vågen levereras är Vågindikator/Handtag-delen inte monterad. Den monteras enkelt bakom ryggstödet och skruvas fast. Sätt i kontakten på indikatorns undersida. Drag inte i kabeln, håll i kontakten. Det finns en liten knapp som mekaniskt lås i plug-in kontakten. Var försiktig när armstöden monteras så att inte ryggstödet skadas. **Vågen är klar att använda.**



Felsökning / service

Inkoppling av lastcell (tyvärr är dokumentationen tvetydig så skulle inte denna instruktion fungera, pröva den generella inkopplingsinstruktion som finns i slutet på denna instruktion)

Intern Inkoppling

	Serienummer	Lastcell	Lastcell	Lastcell	Lastcell
DIN-Kontakt		1	2	3	4
Anslutning fr lastcellen		+Matning	-Matning	+Signal	-Signal
Lastcell Tempo AKA	96182-96221	Röd	Vit	Svart	Grön
Lastcell Tedeo 1242-250	96222-96241	Grön	Röd	Svart	Vit

OBS Om Vågindikatorn ska öppnas.

Lossa skruvarna på indikatorns sida. Öppna lådan försiktigt.

Felsökning

Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad.

5. Stäng av och sätt på vågen igen eller tryck på ZERO. Vågen ska visa 0,0.

6. Kvarstår felet kontrollera att inte något fotstöd ligger emot stolens hjul.

7. Inspektera kabeln till lastcellen under sitsen.

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning.

Kalibrering:

Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att kalibrera enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säkra på att den kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den är märkt med.

Fel: Vågen visar 0,0 hela tiden, är "död" eller ostabil.

3. Kontrollera batteriet.

4. Kontrollera sladdkontakten.

Fel: Vågen är svår att starta.

Tryck på OFF och sedan ON

Fel: Displayen visar små nollor.

Vågen kalibreras.

Fel: Vågen visar F1

Kalibreringsomkopplaren på Indikatorns baksida har av misstag ställts i kalibreringsläge. Ställ om den till andra läget.

Kalibrering

Vi rekommenderar att vågen kalibreras i intervall om 1 år. Helst med M1 klassade vikter minst 75 kg. Vågindikatorn kalibreras i två moment, nollpunkten och maxpunkten.

1. Ställ kalibreringsomkopplaren på Vågindikatorn WI-5000:s baksida i kalibreringsläge och tryck på **ON**
2. Displayen visar nu "**F1**" för att visa att vågen är i kalibreringsläge.
3. Stega upp till parameter F16 med **PRINT**. Avlasta vågen.
4. Tryck på **ON/ZERO**, displayen ska visa ett fyrsiffrigt värde. Tryck på **ON/ZERO** igen, displayen ska visa noll eller nära noll och tryck sedan på **NET/GROSS** för att spara. Displayen visar momentant "**EndC0**" och sedan F16.
5. Stega upp till parameter F17 med **PRINT**. Belasta vågen med kalibreringsvikten.
6. Tryck på **ON/ZERO**. Displayen kommer momentant att visa "**C1**" följt av ett värde med blinkande siffror.
7. Använd knapparna för att justera displayvärdet till aktuellt värde på kalibreringsvikten. Öka det blinkande värdet med **lb/kg** och minska det med **ZERO**. Läget på den blinkande siffran ändras med **PRINT** eller **TARE**.
8. Efter att rätt värde är inställt lagras detta med **NET/GROSS** för att spara. Om kalibreringen har lyckats kommer "**EndC1**" visas momentant och sedan F17.
9. Ställ tillbaka kalibreringsomkopplaren till normalläge.

Kontrollera att vågen visar rätt.

Fullständig information på Vågindikatorn WI-5000 kan laddas hem på www.vetek.net

Generell instruktion för anslutning av lastcell med DIN kontakt till Vågindikator för Stolvåg

1. Lossa hylsan på DIN-kontakten från lastcellen och låt stiften sitta i honkontakten på Indikatorn.
2. Starta Indikatorn.
3. Mät med ett universalinstrument fram vilka stift som har ca 5 Volt. Notera det som har plus-potential som +Matning och det med noll potential som –Matning.
4. Kontrollera i nedan tabell vilken lastcell som sitter under sitsen och löd fast +Matning och –Matning.
5. Löd fast –Signal till stift 4 i kontakten och +Signal till det stift som ingen tråd är lödd på.
6. Kalibrera vågen. Om Indikator av något skäl inte går att kalibrera, skifta + och –Signal och pröva igen.

Anslutning fr lastcellen	+Matning	-Matning	+Signal	-Signal
Lastcell Tedeo 1241 / 1242	Grön	Svart	Röd	Vit
Lastcell Transcell FAS	Röd	Svart	Grön	Vit
Lastcell Tempo AKA	Röd	Svart	Vit	Grön