



---

## Duschvagnsvåg DSV-150

---

Så här använder ni vågen:



Håll in knappen 1-2 sekunder för att slå på eller stänga av vågen. Står den oanvänd i mer än 10 minuter stänger den av sig själv.



Visar inte vågen 0,0kg tryck på ZERO. Om vikten är över 15,0kg måste TARE användas



### Patienten kan nu duschas och vägas

För bästa batteriekonomi rekommenderar vi att Ni alltid stänger av vågen när vägningen är klar.

### Laddning batteri:



Ladda batteriet när indikeringen är nere på ett streck..

Laddning bör alltid göras över natten (ca 8 tim). Oavsett vad batterisymbolen visar så rekommenderar vi att laddning sker minst en gång per månad.



- Laddning ska ske i torrt utrymme och endast med laddare som är märkt med "Endast för duschvagnsvåg". Modell Mascot 2122-13,2V
- Duschvagnen får ej användas med laddaren inkopplad.