


# TANITA

## KROPPSANALYSVÅG BF-350 INSTRUKTIONSMANUAL

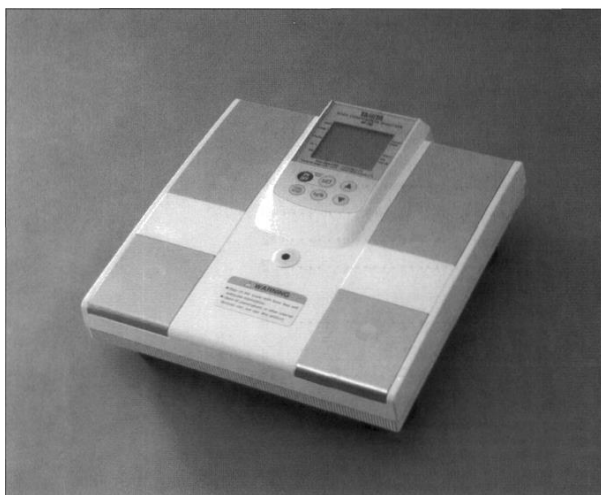

Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant och håll den till hands för framtida referens.

---

# 1. Innehåll

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Innehåll .....                                  | 2  |
| 2. Specifikationer .....                           | 3  |
| 3. Viktiga noteringar för användare .....          | 4  |
| Varningssymboler .....                             | 4  |
| VARNING .....                                      | 4  |
| VARNING .....                                      | 4  |
| ERINRAN .....                                      | 4  |
| Underhåll .....                                    | 5  |
| Allmänna instruktioner för noggrann mätning.....   | 5  |
| 4. Lista över delar och vågkomponenter .....       | 6  |
| Lista över delar .....                             | 6  |
| Vågkomponenter - ovanifrån .....                   | 6  |
| Display och knappsats.....                         | 7  |
| Enhetens baksida .....                             | 7  |
| 5. Anordna .....                                   | 8  |
| Strömförsörjning .....                             | 8  |
| Nivellering av vägningsplattformen .....           | 8  |
| 6. Bruksanvisning .....                            | 9  |
| Kroppssammansättningsanalys (Kroppsfett-läge)..... | 9  |
| "Endast vikt" läge .....                           | 12 |
| BMI-läge .....                                     | 12 |
| 7. Felsökning .....                                | 14 |
| 9. Valfri programvara. ....                        | 14 |

## 2. Specifikationer

| Modell                          |                  |                                           | BF-350                                  |                                |                                        |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Impedansmätning                 | Mätsystem        |                                           | Tetra polar Bioelektrisk impedansanalys |                                |                                        |
|                                 | Mätfrekvens      |                                           | 50kHz                                   |                                |                                        |
|                                 | Mätström         |                                           | 500µA                                   |                                |                                        |
|                                 | Elektrodmaterial |                                           | Tryckkontakt rostfritt stål fotdynor    |                                |                                        |
|                                 | Mätstil          |                                           | Mellan båda fötterna                    |                                |                                        |
|                                 | Mätområde        |                                           | 150~900 Ω                               |                                |                                        |
| Viktmätning                     | Mätsystem        |                                           | Lastcell för töjningsmätare             |                                |                                        |
|                                 | Maxkapacitet     |                                           | 200kg                                   | 440lb                          | 31st6lb                                |
|                                 | Minsta gradering |                                           | 0.1kg                                   | 0.2lb                          | 0.2lb                                  |
| Inmatningsartikel               |                  |                                           |                                         |                                |                                        |
|                                 | Kön              |                                           | Kvinna / Man                            |                                |                                        |
|                                 | Kroppstyp        |                                           | Standard / Atletisk                     |                                |                                        |
|                                 | Ålder            |                                           | 7~99 år / 1 års ökning                  |                                |                                        |
|                                 | Längd            |                                           | 90~249cm<br>1cm ökning                  | 3ft~7ft 11.5in<br>0.5in ökning |                                        |
| Utmättningsartikel              | Display          | Vikt                                      | 0~200kg<br>0.1kg ökning                 | 0~440lb<br>0.2lb ökning        | 0~31 <sup>st</sup> 6lb<br>0.2lb ökning |
|                                 |                  | Kön                                       | 7~99 år / 1 års ökning                  |                                |                                        |
|                                 |                  | Kroppstyp                                 | Standard/Atletisk                       |                                |                                        |
|                                 |                  | Ålder                                     | 7~99 år / 1 års ökning                  |                                |                                        |
|                                 |                  | Längd                                     | 90~249cm<br>1cm ökning                  | 3ft~7ft 11.5in<br>0.5in ökning |                                        |
|                                 |                  | Kroppsfett%                               | 1.0~75.0.% / 0.1% ökning                |                                |                                        |
| Display                         |                  | 2 rader, 5 siffrors LCD                   |                                         |                                |                                        |
| Utmaningsdata gränssnitt        |                  | RS-232C (D-SUB 9. Stifts Hane kontaktdon) |                                         |                                |                                        |
| Strömförsörjning                |                  | AC-adapter (ingår) Center minus           |                                         |                                |                                        |
| Märkeffekt                      |                  | DC9V 200mA                                |                                         |                                |                                        |
| Energiförbrukning               |                  | 0.7W                                      |                                         |                                |                                        |
| Temperaturområde för användning |                  | 0~35°C/32~95°F                            |                                         |                                |                                        |
| Vikt på utrustning              |                  | 7.5kg/16 ½ lb                             |                                         |                                |                                        |

Kommenterad [EV1]: På engelska: Pressure Contact  
Stainless Steel Foot Pads

# 3. Viktiga noteringar för användare

## Varningssymboler

Tack för att du köpte denna precisions gjorda Tanita-produkt. För optimal prestanda och säkerhet, vänligen bekanta dig med försiktighetssymbolerna nedan. Dessa symboler är utformade för att varna användaren till potentiella faror vid användning av denna utrustning. Att ignorera dessa försiktighetssymboler kan leda till allvarig skada, eller skada på produkten. Läs noggrant innan du fortsätter med bruksanvisningen.

|                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>VARNING</b> | Denna symbol indikerar möjligheten till dödsfall eller allvarig skada om produkten missbehandlas eller instruktioner ignoreras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>VARNING</b> | Denna symbol indikerar möjligheten till elektriska stötar. Vänligen ägna särskild uppmärksamhet åt avsnitt som bär detta märke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>ERINRAN</b> | Denna symbol indikerar möjligheten till fysisk skada eller utrustningsskada om instruktioner ignoreras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                | Denna symbol indikerar allmänna försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid användning av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>VARNING</b> | <b>Personer med pacemakers eller andra interna medicintekniska produkter</b><br>Eftersom Tanita´s kroppsanalysvåg skickar en svag elektrisk ström genom kroppen, bör individer som har pacemakers eller andra interna medicintekniska produkter inte använda den här produkten. Den svaga elektriska signalen kan orsaka funktionsfel för sådana interna enheter.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    |                | <b>Korskontaminering</b><br>Denna produkt måste användas med bara fötter. Var noga med att rengöra vågplattan med lämpligt desinfektionsmedel efter varje användning. Håll aldrig vätska direkt på plattformen eftersom det kan läcka in i produkten och orsaka funktionsfel. Använd en mjuk trasa och lämpligt desinfektionsmedel eller ett neutralt rengöringsmedel för att torka av plattformen. Torka inte av med starka kemikalier.                                                                                                                                                 |
|  | <b>VARNING</b> | <b>Infoga och ta bort strömsladden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- För att minska risken för elektriska stötar eller skada på produkten, sätt aldrig in eller dra ur AC-adaptern med våta händer.</li><li>- För att undvika brandrisk, se till att vägguttaget fungerar ordentligt. Undvik att använda fleruttags-förlängningssladdar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>ERINRAN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- För att minska risken för felaktig mätning, placera vågplattformen på en fast, plan yta.</li><li>- För att minska risken för skada eller funktionsfel för utrustning, kliv alltid på plattformen långsamt.</li><li>- För att minska risken för brand eller skada på produkten, använd endast den försedda Tanita AC-adaptern.</li><li>- Använd inte produkten nära utrustning som mobiltelefoner och terapeutiska mikrovågsugenheter. Sådan utrustning kan orsaka funktionsfel för produkten och påverkar noggrannheten av resultaten.</li></ul> |



## Underhåll

För att säkerställa optimal prestanda från den här produkten, observera följande instruktioner:

- Koppla ur AC-adaptorn från vägguttaget när produkten inte kommer att användas under längre perioder.
- Stäng alltid av innan du kopplar ur AC-adaptorn från vägguttaget.
- Demontera aldrig utrustningen. Ring alltid ditt närmaste Tanita-kontor eller återförsäljare för instruktioner.
- Tappa inte enheten och undvik platser som utsätts för konstant vibration.
- Placera inte enheten för nära en värmeenhet eller i direkt solljus,
- Undvik snabba temperaturfluktuationer.
- Överdriven fuktighet kan skada utrustningen.
- När enheten förs till en annan plats där det är en skillnad på mer än 20°C (68°F), vänta minst 2 timmar före användning.



## Allmänna instruktioner för noggrann mätning

Denna produkt är utformad för användning av personer med normal och atletisk byggnad. Dock får kanske inte vissa individer exakta resultat eftersom de faller utanför befolkningen för vilken Tanitas produkter utvecklades.

- Eftersom denna produkt använder en svag elektrisk ström för att mäta impedans, kommer det bästa resultatet att uppnås när mätningar tas i bara fötter.
- Dålig kontakt mellan fötterna och elektroderna kan ge ett felmeddelande. Hälar ska placeras direkt ovanpå de bakre elektroderna, medan fotens främre del behöver vara i kontakt med de främre elektroderna. Se också till att fotsulorna är fria från överflödigt smuts, eftersom det kan fungera som en barriär och förhindra den milda strömmen att strömma ordentligt.
- Noggranna mätningar kan fortfarande vara möjliga även om det finns förhårdnader på fotsulorna eller om användaren har tunna nylonstrumpor. Placera 0.5ml (0,017oz) saltlösning eller vatten i mitten av varje elektrod. Detta kommer att fungera som en ledare, och kan låta strömmen passera fritt genom en tunn barriär.
- Håll elektroderna rena genom att torka med desinfektionsmedel.
- Fluktuationer i hydratiseringsstatus (dvs vattenhalten i kroppsvävnader) kan påverka resultaten av kroppssammansättningsanalysen.
- Användarens inre lår ska inte vara i kontakt. Om de är det, bör en torr handduk hållas mellan användarens ben.




### • Tolkning av resultat

Uppgifterna som tillhandahålls av denna produkt, såväl som alla kompletterande uppgifter, såsom kost- eller träningsprogram baserat på dessa uppgifter, bör tolkas av en licensierad professionell.


För mer information om hur du får exakta mätningar, se det tekniska anvisningar.

# 4. Lista över delar och vågkomponenter

## Lista över delar
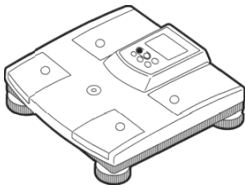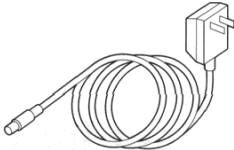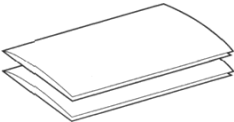
| Våg                                                                                | AC-adapter                                                                        | Dropper                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>GaWarranty and Instructions</b>                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
|  |                                                                                   |                                                                                   |
| ● Instruction Manual<br>● Technical Notes                                          |                                                                                   |                                                                                   |

## Vågkomponenter - Ovanifrån

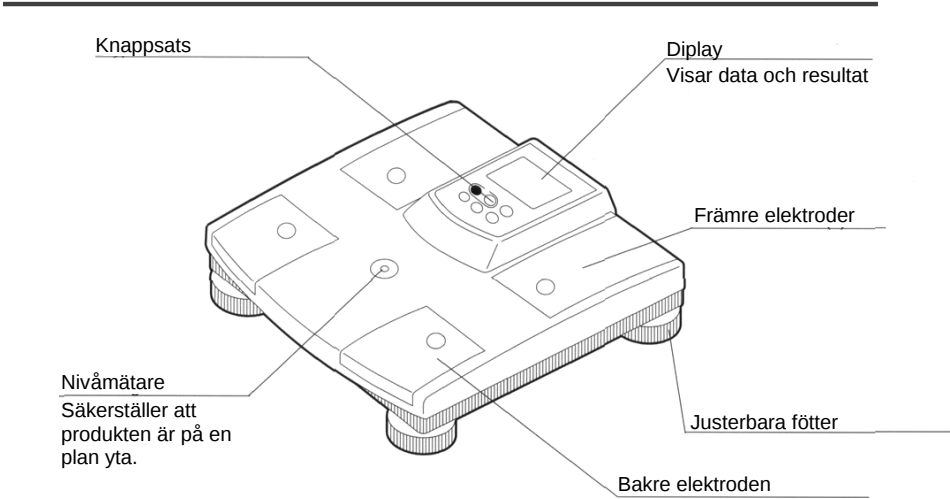

## Display och knappsats

### ON/OFF knapp

Tryck för att slå på och av.

### ZERO/RESET knapp

Använd för att nollställa eller återställa viktvärden.

### SET knapp

Bekräftar dataval. Tryck samtidigt på (ON/OFF) knappen för att växla till endast vikt-läge. (Se s.12)

### UPP-pil


Använd för att välja läge eller öka numeriska värden.

### NER-pil


Använd för att välja läge eller minska

### Kg/lb knapp

Ändrar måttenheter

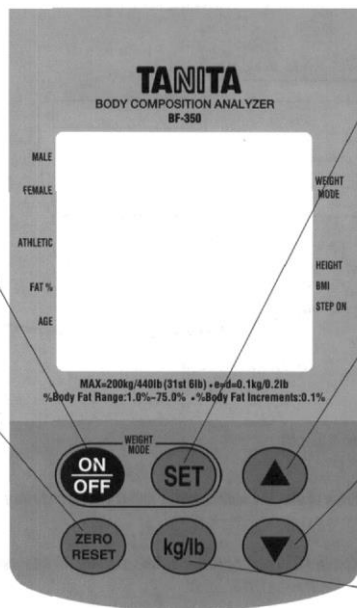

## Enhetens baksida

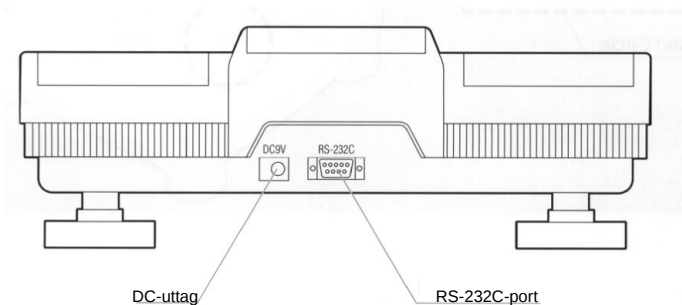


DC-uttag

RS-232C-port

## 5. Anordna

### Strömförsörjning

---

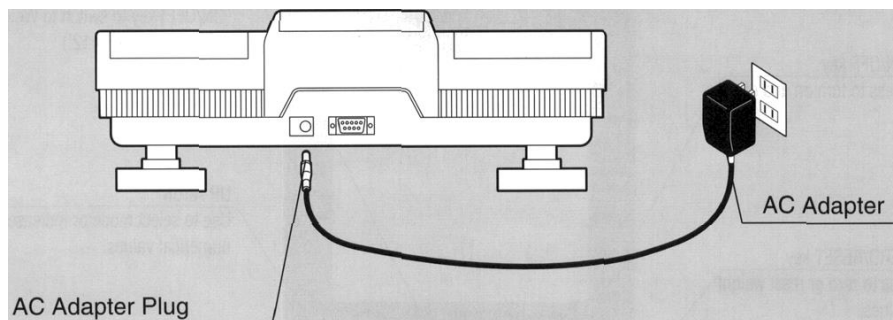

1. Sätt i AC-adaptorns kontakt i DC-uttaget på enhetens baksida.
2. Anslut AC-adaptorn till ett AC-uttag.



#### Varning

För att minska risken för elektriska stötar, sätt aldrig i eller ta ut kontakten med våta händer.



#### Erinran


Använd endast den medföljande Tanita AC-adaptorn. Användning av andra AC-adaptrar kan orsaka rök eller brand.

OBS: AC-adaptorn som medföljer den här produkten har en inbyggd omvandlare och kan hantera antingen 110V eller 220V-system.

### Nivellerings av vägningsplattformen

---

Om du använder den på en ojämn yta kan fötterna justeras för att säkerställa en jämn och stabil plattform.

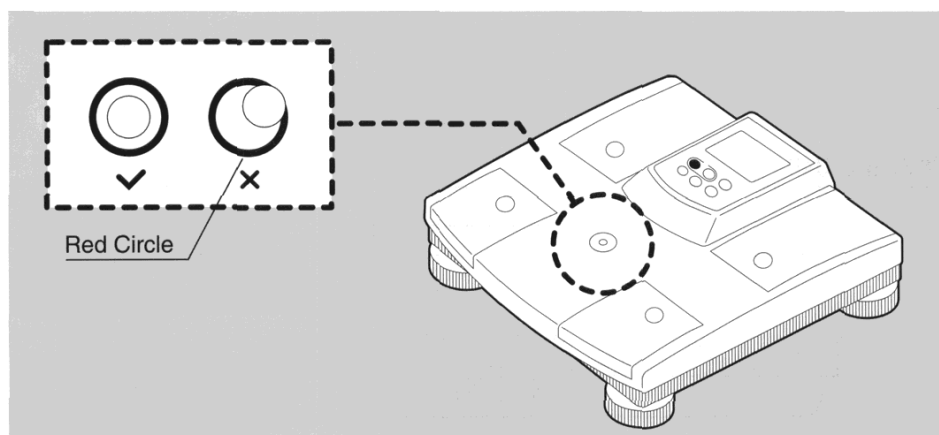

## 6. Bruksanvisning

### BF-350 kan användas på två sätt:

Som en "fristående" enhet där data matas in på plattformens knappsats och visas på displayen.


ELLER

Länkad till en dator med Tanitas programvara. Detta möjliggör PC-baserad datainmatning och **erövring** (capture).  
(Se s.14)

### Använda BF-350 som en "fristående" enhet

När du har ställt in enheten (sidan 8), använd knappsatsen på vågplattformen för att mata in data.

### Kroppssammansättningsanalys (kroppsfettläge) Obs: Den här enheten är fabriksinställd för att alltid starta i kroppsfettläge.

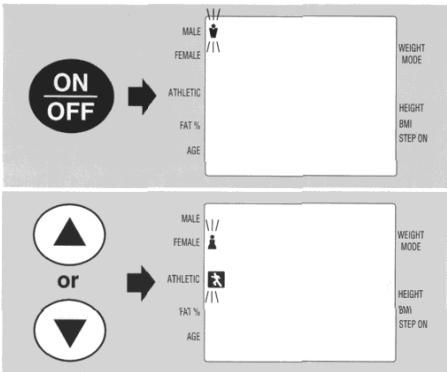

#### 1. Tryck på (ON/OFF) - knappen för att slå på enheten.

Hela displayen kommer att blinka i några sekunder och sedan kommer "♂" könssymbolen blinka.

#### 2. Inmatning av kön och kroppstyp

Välj lämpligt kön- och kroppstypsymbol med hjälp av piltangenterna. Tryck på SET-knappen för att bekräfta valet.

♂ : Standard Man.

♀ : Standard Kvinna.

♂ ⚡ : Manlig atlet.

♀ ⚡ : Kvinnlig atlet.



### ERINRAN

\*Följande personer ska använda Atletläget:

- Personer över 16 år som tränar minst 10 timmar i veckan, konsekvent under en period av minst 6 månader.
- Personer som har en vilopuls på cirka 60 slag per minut eller mindre.
- Detta läge inkluderar personer som har varit mycket vältränade i flera år men för närvarande tränar mindre än 10 timmar per vecka.

\* För mer information om atletläge, se de tekniska anvisningarna.

#### 3. Åldersinmatning

Håll ned (▲▼) för att bläddra upp eller ner till önskad ålder. Tryck på SET för att bekräfta valet.


#### 4. Längdinmatning




\* Tryck på kg./lb. för att ändra mätinställningar. Håll ned (▲▼) för att bläddra uppåt eller nedåt till önskad längd. Tryck på SET för att bekräfta valet.



### CAUTION

Om ett misstag görs under datainmatning stänger du bara av enheten och återgår till steg 1.

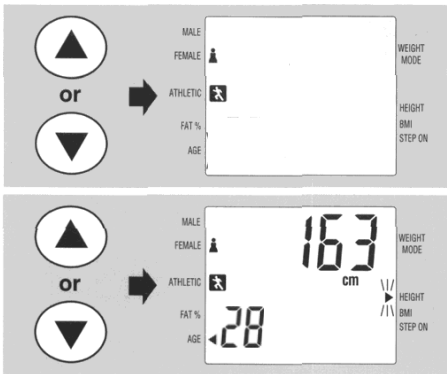

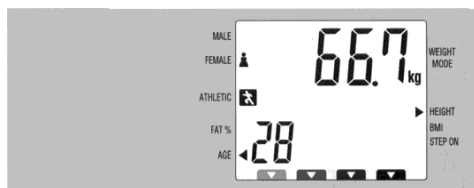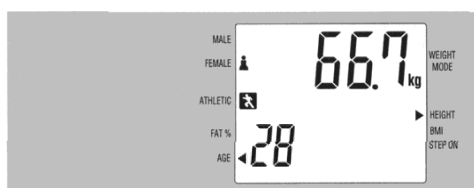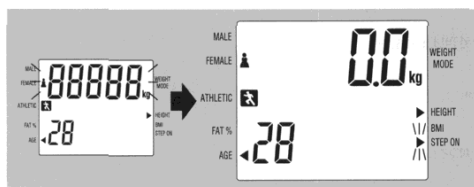

## 5. När ► markören bredvid "STEP ON" blinkar, kliv då på vägningsplattformen.

Stå med båda fötterna plana på elektroden. Se till att dina fötter är placerade över de främre och bakre elektroderna. Stå vänd framåt, stå still och böj inte knäna.

När den väl är stabiliserad kommer kroppsvikt att visas på den övre delen av skärmen.

## 6. Mätning av kroppsfett

■■■■ som visas på den nedre delen av displayen indikerar att % kroppsfett mäts. Dessa märken försvinner en efter en när en lyckad mätning görs. Detta bör bara ta cirka 10 sekunder

## ! ERINRAN

Gå inte av plattformen innan alla ■■■■ märken försvinner och enheten avger en kort pip. Om du gör det kommer det att avbrytas och alla ■■■■ markeringar kommer att visas igen.


(Mätningen kan fortsätta om testpersonen går tillbaka omedelbart).

## ! ERINRAN

Stå så stilla som möjligt på vägningsplattformen. Om mätvärdena förblir instabila över en viss tid visas felmeddelandet "E-16" och enheten stängs automatiskt av. Om detta inträffar, slå på enheten igen och återgå till steg 2.

## ! ERINRAN


Om ■■■■ märkena inte försvinner helt, se till att fötterna är ordentligt placerade på varje elektrod och att personen antingen är barfota eller att rätt mängd salledare används.

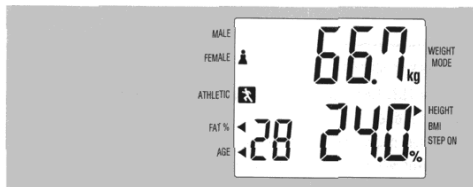

#### 7.Resultat


Enheten avger en kort pip, och därmed kan personen försiktigt kliva av plattformen. Vikten visas på den övre delen av skärmen, medan % kroppsfett visas på den nedre halvan. Dessa resultat kommer att förbli på skärmen i cirka 30 sekunder.

GB

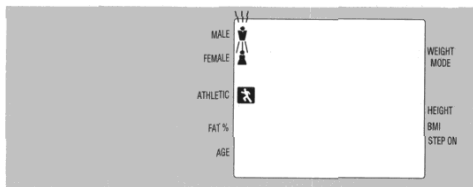

#### 8.Fortsatt mätning

Vågen återställs automatiskt efter cirka 30 sekunder.  
Tryck på valfri knapp (förutom PÅ / AV) för att återställa vågen före 30 sekunder.  
För att testa ett nytt föremål, gå tillbaka till steg 2.

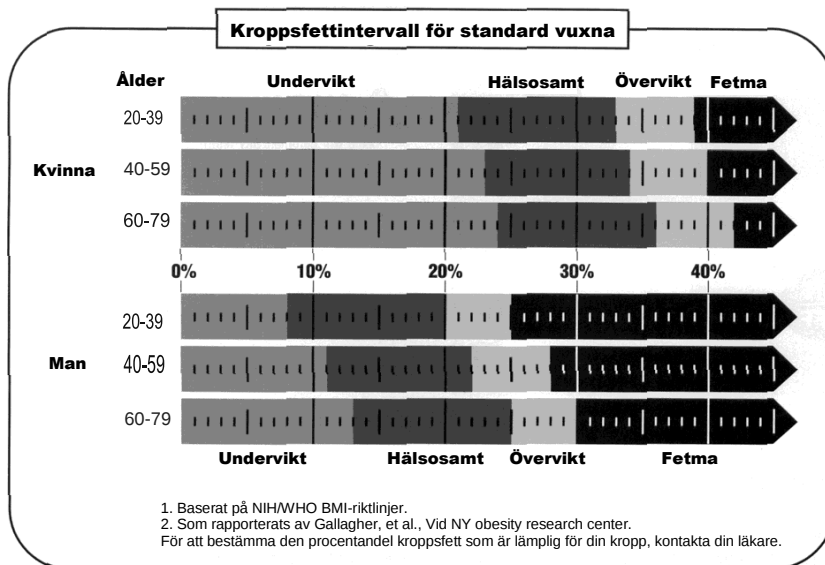

## ”Endast vikt” läge

Det är möjligt att inaktivera % kroppsfettfunktionen på BF-350 och endast använda enheten för vikt.




### 1. Tryck på (ON/OFF) och (SET) samtidigt för att aktivera ”Endast vikt”-läget.

Hela displayen blinkar i några sekunder och visar sedan "0.0".

En markör visas på skärmen bredvid "Weight Mode". När en markör börjar blinka bredvid "Step On" kan personen kliva på viktplattformen.


\* Ett minustecken kan visas när (ON / OFF) och (SET) knapparna släpps. Om detta händer, tryck på (ZERO / RESET) för att visa "0.0" igen.

\* Tryck på kg./lb. för att ändra mätinställningar.

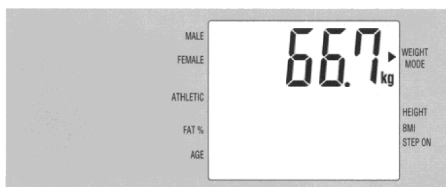

### 2. Göra viktuppmätningar.

Vikt visas i den övre delen av displayen. När vikten har stabiliserats kan personen försiktigt kliva av plattformen.

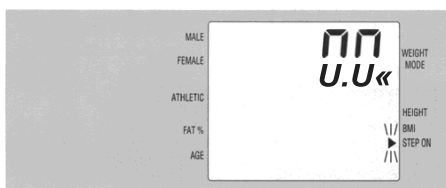


### 3. Fortsatt mätning.

Vänta tills displayen återgår till "0.0" och "Step On" markören börjar blinka. Kliv försiktigt på plattformen.




## ERINRAN

Vågen återgår automatiskt till "Body Fat Mode" när enheten stängs av.

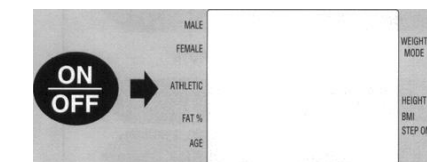

## BMI-läge

Detta läge beräknar automatiskt kroppsmasseindex (BMI) och mäter vikt. För en förklaring av BMI hänvisas till de tekniska anvisningarna.

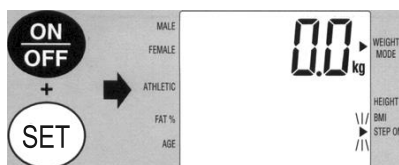


### 1. Tryck på (ON/OFF) och (SET) samtidigt.

Hela displayen kommer att blinka i några sekunder och sedan visas "0.0". ▶ markören kommer dyka upp på displayen bredvid "Weight Mode", och "Step On" ▶ markören kommer blinka.

\* Ett minustecken kan visas när knapparna (ON / OFF) och (SET) släpps. Om detta händer, tryck på (ZERO / RESET) för att visa "0.0" igen.


\* Tryck på kg./lb. för att ändra mätinställningar.

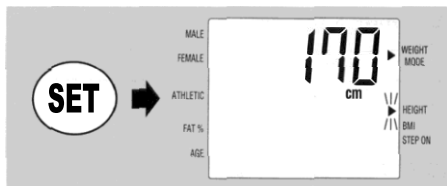

## 2. För att aktivera BMI-läge, tryck på SET-knappen en gång till.

En standardinställning för längd visas i antingen F/In. eller cm.


Tryck på kg/lb. för att ändra mätinställningar.

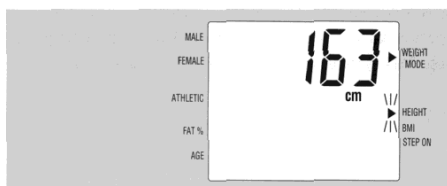


## 3. Längdinmatning.

\* Håll ned piltangenterna för att bläddra till önskad längd.

\* Tryck på SET för att bekräfta inställningen.

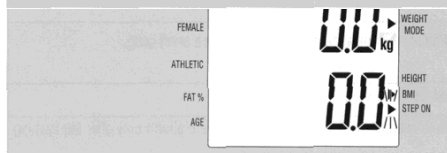

Displayen visar då "0.0". En markör blinkar på displayen bredvid BMI och en annan blinkar bredvid "Step On".

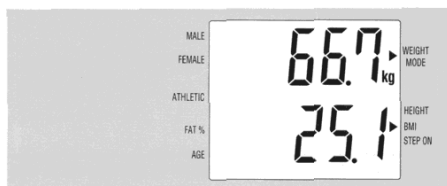


## 4. Mätning av BMI

\* När ► markören bredvid "Step On" blinkar, kliv försiktigt på plattformen.

\* Vikt visas på den övre delen av displayen, BMI visas på den nedre delen.

\* Resultaten försvinner när personen kliver av vägen.

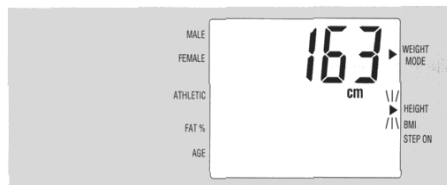

## 5. Fortsatt BMI-mätning.

\* Tryck på SET-knappen två gånger.

Gå tillbaka till steg 3, "längdinmatning".

\* För att återgå till "Endast vikt"-läge: Tryck på SET-knappen en gång.

\* För att återgå till "Kroppsfett"-läge: Stäng av enheten och sätt på den igen med PÅ / AV-knappen.

# 7. Felsökning

Nedan listas några vanliga problem och enkla lösningar.

| Problem                                                      | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten slås inte på när du trycker på (ON/OFF) - tangenten. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollera att AC-adaptorn är korrekt ansluten till enheten.</li><li>- Se till att AC-adaptorn är ansluten till ett vägguttag.</li><li>- Se till att du använder en Tanita AC-adapter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "E-01" visas.                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- "E-01" visas när impedansen är onormal jämfört med längd och vikt.</li><li>- Se till att mätningarna gjordes med bara fötter och att fötterna var i kontakt med elektroderna.</li><li>- Om personen bär tunna nylonstrumpor eller har tjocka förhårdnader, placera 0,5 ml (0,017 oz) saltlösning eller vatten i mitten av varje elektrod. Tjocka nylonstrumpor eller strumpor ger en "E-01" -avläsning och bör därför tas bort.</li><li>- Kontrollera persondata för noggrannhet.</li></ul> |
| "E-11/12/13/14" visas.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dessa visas när ett internt fel har inträffat. Ring ditt närmaste Tanita kontor eller återförsäljare.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "E-16" visas.                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gå inte av plattformen förrän alla <input checked="" type="checkbox"/> försvinner och enheten avger ett kort pip.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "-----" visas.                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Den maximala viktkapaciteten har överskridits.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "E-17" visas.                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gå inte in på plattformen när du anger personuppgifter. Kliv på plattformen först efter att den blinkande pilen visas bredvid "Step On".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 8. Valfri programvara

Tanita Corporation har programvara tillgänglig som kraftigt förbättrar enhetens funktionalitet och kapacitet. Förutom att använda BF-350 från ett fjärrdatortangentbord fungerar Tanitas programvara som en klientdatabas, rapportgenerator och en hyckelfärdig vikthanteringslösning. Kontakta din närmaste Tanita-återförsäljare för mer information.

Om din anläggning vill integrera BF-350 i ett befintligt interaktivt mjukvaruprogram, vänligen kontakta ditt närmaste Tanita branch office för RS-232-kommunikationsprotokoll och specifikationer för överföring.

**Kommenterad [EV2]:** På engelska: turn-key weight management solution



This device features radio interference suppression in compliance with valid EC Regulation 89/336/EEC.



#### FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

#### Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

# TANITA

#### TANITA Corporation

14-2,1-chome, Maeno-cho, Itabashi-ku  
Tokyo, Japan  
Tel: (03)3968-2123 / (03)3968-7048 Fax: (03)3967-3766

#### TANITA Corporation of America, Inc.

2625 South Clearbrook Drive  
Arlington Heights, Illinois 60005 U.S.A.  
Toll Free : (800) 826-4828  
Tel : 847-640-9241  
Fax : 847-640-9261  
<http://www.tanita.com>

#### TANITA Health Equipment H.K.LTD.

Unit 301-303 3/F Wing On Plaza,  
62 Mody Road, Tsimshatsui East,  
Kowloon, Hong Kong  
Tel : +852-2838-7111  
Fax : +852-2838-8667

#### TANITA Europe GmbH

Dresdener Strasse 25  
D-71065 Sindelfingen,  
Germany  
Tel : 07031-6189-6  
Fax : 07031-6189-71

#### TANITA UK LTD.

The Barn, Philpots Close,  
Yiewsley, West Drayton,  
Middlesex, UB7 7RY,  
United Kingdom  
Tel : +44-1895-438577  
Fax : +44-1895-438511

#### TANITA France S.A.

Villa Labrouste  
68 Boulevard Bourdon,  
92200 Neuilly-Sur-Seine,  
France  
Tel : 01 55 24 99 99  
Fax : 01 55 24 98 68